



## ENTRENADOR DE GESTIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS

---

**SKU:** MFS702

**Categorías:** [Manejo de Vía Aérea - Intubación](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Torso diseñado para asegurar una vía aérea, la intubación traqueal requiere altas habilidades y conlleva riesgos, para que el personal médico de emergencia pueda realizar la intubación, es imprescindible la formación en la administración de anestesia en el quirófano.

Habilidades:

Flexión de cuello y extensión de cabeza:

- Normal.
- Nek flexión y extensión de cabeza.
- Avance de la mandíbula.

Posible confirmación de aire intubado por error:

- Cuando está correctamente intubado y ventilado, puede confirmar que los cofres izquierdo y derecho se elevan.
- Cuando los intubados se ventilan con un pulmón, se puede confirmar el error, ya que solo se levantará un lado.
- Cuando el tubo traqueal ha sido intubado por error hacia el esófago y se envía aire, el abdomen se elevará, lo que permitirá confirmar el error (inflado de estómago).

Características:

Posibilidad de práctica realista:

- Es posible adquirir la habilidad de intubación traqueal oral y nasal.
- Permite la habilidad de diseñar las vías respiratorias supraglóticas (como la vía aérea con máscara laríngea, la vía aérea del tubo gástrico esofágico).
- La lengua, la epiglotis y la faringe se han reproducido como un cuerpo vivo.
- Debido a que la lengua y la boca son suaves, el uso del laringoscopio y el entrenamiento para asegurar las vías respiratorias se pueden realizar de una manera cercana a un cuerpo vivo.

Daño de los dientes frontales:

- Cuando se usa un laringoscopio, si se ejerce presión, usando los dientes como punto de apoyo, de manera equivocada, los dientes frontales (cuatro superiores) se rompen (los dientes frontales son intercambiables).

Es posible la confirmación del sonido del aire izquierdo y derecho con un estetoscopio:

- Permite confirmar la ventilación unipulmonar.
- Permite confirmar intubación esofágica accidental.

Contiene:

- 1 Modelo de formación; 3 Juegos de dientes delanteros; 1 Aceite lubricante; 1 Talco de bebé; 1 Estuche de

almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=f8chKSmWTC4&t=4s>