


ENTRENADOR DE HABILIDADES "FREDDIE FISTULA"

SKU: MFS801

Categorías: [Cuidado de Heridas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES

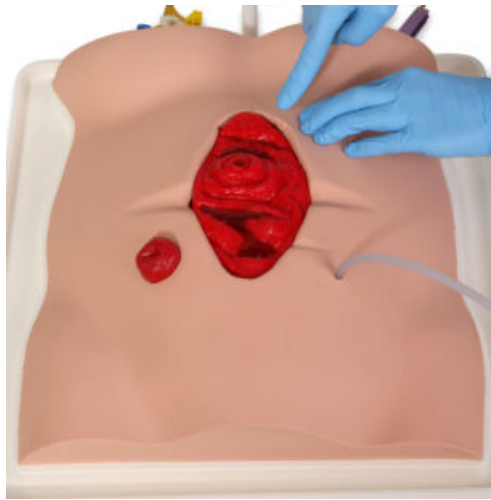

- 1 Effluent catch tray with skin
- 2 Drain tube
- 3 Surgical staples
- 4 Fistulas (three orifices for effluent to flow)
- 5 Stoma
- 6 Support rod for holding the effluent bag
- 7 500 ml fluid bag for effluent with rolling pinch clamp
- 8 1 quart bottle of effluent concentrate (just add distilled water)
- 9 Baby powder
- 10 3-way tube set with color-coded blue, white, & yellow pinch clamps
- 11 Skin fold creases



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para enseñar y practicar el manejo de las fístulas abdominales, la contención del efluente de las fístulas se maneja más comúnmente con protección para la piel, apósitos, succión regulada de la pared o terapia de presión negativa, el simulador permite la enseñanza y la práctica de varios apósitos que pueden usarse para el manejo del drenaje y la clasificación de la fístula o fístulas.

Hay tres fístulas separadas presentes en los intestinos:

- Fístula estomatizada.
- Fístula no estomatizada.
- Fístula oculta: la ubicación no es observable.

Aspectos generales del simulador:

- Presenta un abdomen suave de sensación realista con una herida abdominal abierta que muestra intestinos expuestos con "canales" en todos los lados, estoma y tubo de drenaje.
- El abdomen incluye una base con un área empotrada alrededor del perímetro que puede contener 700 ml de efluente, así como una varilla que se puede colocar en un accesorio incorporado para colgar la bolsa de efluente o encajar en el fondo de la base cuando no esté en uso.
- Se puede abrir cualquier combinación de las tres fístulas para permitir que el efluente salga de las fístulas a través de las pinzas de pellizco codificadas por colores, esto puede desafiar a aplicar un apósito mientras trata con un efluente,
- La piel patentada permite que los apósitos estándar se adhieran y se retiren fácilmente, los apósitos de presión negativa sellarán cuando se apliquen.
- Permite utilizar barreras cutáneas: obleas sólidas, polvos, pastas, selladores cutáneos y apósitos estándar.
- Estuche de transporte incluido.

Componentes del producto:

- Bandeja recolectora de efluentes con piel.
- Tubo de drenaje.
- Grapas quirúrgicas.
- Fístulas (tres orificios para que fluya el efluente).
- Estoma.
- Varilla de soporte para sujetar la bolsa de efluentes.
- Bolsa de fluido de 500 ml para efluentes con pinza de rodillo.
- Botella de 1 litro de efluente concentrado (solo agregue agua destilada).
- Talco para bebés.
- Juego de tubos de 3 vías con abrazaderas de apriete codificadas por colores en azul, blanco y amarillo.
- Pliegues en la piel.

