



SET BÁSICO DE SIMULACIÓN DE HERIDOS

SKU: MFS252

Categorías: [Cuidado de Heridas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Heridas Simuladas - Moulage](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite crear heridas extremadamente realistas para la formación en primeros auxilios. Los moldes incluidos en este set pueden rellenarse muchas veces con compuesto de simulación de heridas.

Los moldes rellenos se presionan sobre la posición de la herida deseada una vez que el compuesto se ha secado, la herida se adhiere a la piel o al maniquí sin necesidad de pegamento.

Se puede añadir poco de la sangre artificial suministrada y la herida estará lista para su uso. Para aquellos que requieren un realismo extremo, se puede añadir un compuesto de carne a la herida para hacerla aún más realista. Las heridas pueden vendarse varias veces, retire el vendaje de la herida, lave la sangre y vuelva a aplicar sangre nueva.

Una vez finalizado el entrenamiento, las heridas pueden retirarse y eliminarse fácilmente. No es necesario limpiarlas ni mantenerlas. Los consumibles como el compuesto para heridas, el compuesto para carne, el polvo de fijación y la sangre artificial están disponibles por separado. El juego incluye un corte, una laceración superficial y otra más profunda, y una abrasión.

El set incluye también compuesto para heridas, compuesto para carne, polvo de fijación, isopropanol, sangre artificial, una espátula para aplicar los compuestos y algunos bastoncillos de algodón para aplicar la sangre.