

SIMULADOR DE CATETERISMO "PRO"

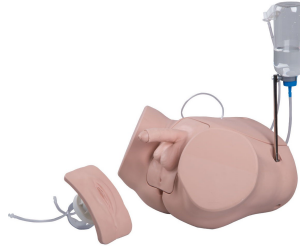


SKU: 103-700

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	103-800	Intercambiable
	103-900	Sólo Femenino
	104-000	Sólo Masculino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite mostrar, practicar y evaluar de manera realista el cateterismo vesical tanto masculino como femenino.

Las piezas genitales se intercambian fácilmente y se colocan en el soporte mediante sujeciones magnéticas (versión PRO). Ambas están fabricadas en material blando y flexible. El prepucio y los labios son móviles y el pene se puede estirar. De este modo, se practican todos los movimientos manuales para realizar el cateterismo. El material proporciona una sensación realista al insertar y extraer el catéter de la vejiga, con una resistencia y una profundidad de inserción muy próximas a las de un paciente real.

Versiones:

- Versión Masculina.
- Versión Femenina.
- Versión Intercambiable.

Aprendizaje directo: Al colocar correctamente el catéter se expulsa líquido por el extremo del conducto, igual que en los pacientes reales. La vejiga transparente permite supervisar la posición del catéter. La pared abdominal se puede retirar para visualizar mejor todo el procedimiento.

Diferentes niveles de dificultad: La pieza insertable masculina permite regular tres niveles de estrechamiento uretral. La posición más estrecha no permite la inserción del catéter, lo cual conduce a la conclusión de que se requiere un catéter suprapúbico.

Características:

- Cateterismo femenino y masculino con resistencia realista.
- 3 Niveles regulables de estrechamiento uretral.
- Prepucio y labios suaves y móviles (para la práctica p. ej. de la desinfección).
- Estructura anatómica realista de la pelvis
- Expulsión de líquido al insertar catéter correctamente.
- Posibilidad de controlar el procedimiento gracias a vejiga transparente y pared abdominal extraíble.
- Soporte seguro con pies antideslizantes para trabajar sobre una mesa.
- Sujeciones magnéticas para montaje y sustitución rápidos.
- Fácil limpieza y mantenimiento, totalmente desmontable.
- La esponja del interior evita la acumulación de humedad

Indicación: Se recomienda el uso de catéteres que cuenten con un solo ojo o con dos ojos nivelados. Son aptos tanto los catéteres de silicona como de PVC.

Catéteres Recomendados:

- Estenosis uretral «estrechamiento abierto» = catéter Ch 16 o catéter con balón Ch 14.
- Estenosis uretral «estrechamiento parcial» = catéter Ch 14 o catéter con balón Ch 12.

IMPORTANTE: No emplee catéteres de punta curvada.

Sugerencia: Según las directrices para un cateterismo correcto, las simulaciones también requieren la aplicación de lubricante (no suministrado) en la uretra para evitar complicaciones en la inserción del catéter. Alternativamente, el lubricante se puede aplicar también en la punta del catéter.

Todas las versiones incluyen:

- Reproducción realista del abdomen; Pieza de cateterismo masculino o femenino con vejiga transparente según corresponda (en la versión intercambiable incluye ambos); Depósito y conexiones para manguera; Bolsa de transporte.