



## SIMULADOR DE PRÁCTICA DE INFUSIÓN POR GOTEO INTRAVENOSO

---

**SKU:** MFS543

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Infusión Intravenosa - Administración de Medicamentos](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo educativo dedicado a enseñar las técnicas de manejo de medicación y asistencia, para un paciente en infusión intravenosa.

Ejercicios:

- Ejercicio 1: Utilice el cilindro externo de aguja permanente intravenosa existente para conectar la ruta de goteo al modelo. (Al insertar el cilindro externo de la aguja permanente intravenosa en el modelo, retire el cilindro interno e inserte solo el cilindro externo para evitar accidentes debido a pinchazos accidentales).
- Ejercicio 2: Pueden producirse algunas fugas de líquido. Debido a su estructura, no es posible prevenir completamente las fugas de líquido.
- Ejercicio 3: Preparar la almohadilla de absorción por separado, la capacidad que se puede soltar varía según la capacidad de la almohadilla de absorción y las condiciones de uso.

Características:

- Puede conectar la ruta de goteo después de conectarla a un paciente simulado. (La ruta de goteo se puede fijar al modelo con cinta médica).
- Se puede practicar ajustando la velocidad de goteo.
- Permite comprobar el cambio en la tasa de goteo según la posición y el estado de la ruta de goteo.
- Debido a que es un modelo específico, es posible reducir las fugas de líquido durante los ejercicios (número 2 y 3).
- Se puede dejar caer un máximo de 200 ml de goteo (fármaco simulado).
- Dado que no hay un tubo de drenaje, también se puede utilizar con fines educativos, como cambiar la ropa para dormir, cambiar de posición y ayudar a los pacientes a moverse durante la infusión.

Contiene:

- 5 Almohadillas para práctica de ejercicio por goteo.